

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/defibrylator-aed-samaritan-pad-350-p-p-1456.html>

# Defibrylator AED Samaritan PAD 350 P

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**SAMARYTAN PAD**

## Opis produktu

Klasyczny defibrylator AED Samaritan PAD 350 P to poręczne i lekkie urządzenie medyczne przeznaczone do zewnętrznego i publicznego użytkowania. Samaritan PAD został stworzony dla powszechnego dostępu do defibrylacji i może być wykorzystany do ratowania życia i zdrowia nawet przez osoby postronne nieposiadające wiedzy medycznej. Urządzenie analizuje rytm serca, dobiera odpowiednią do sytuacji wielkość impulsu defibrylacyjnego i aplikuje go, przywracając organ do właściwej pracy. Samaritan PAD przez cały proces postępowania ratowniczego prowadzi użytkownika za pomocą trzech prostych symboli i poleceń, zapewniając tym samym skuteczny i szybki ratunek osobie, która doznała nagłego zatrzymania krążenia.

### SIŁA KOMUNIKACJI W 3 PROSTYCH SYMBOLACH

Najważniejszą zaletą Samaritana jest prostota użycia. Trzy symbole, niesamowicie intuicyjna grafika i kompaktowy kształt to zwieńczenie pracy zespołu lekarzy i projektantów, którzy stworzyli jedyne AED, które w ultraprostej obudowie chowa zaawansowaną i najbezpieczniejszą technologię. Spójrz na niego. Jeden zielony przycisk wystarczy by był gotowy do działania. Jest w trybie czuwania, elektrody są podłączone i wystarczy je wyjąć. Wszystkie jego detale pozwalają na zaoszczędzenie czasu i pewność wykonywanych ruchów.

### AED I TY. ZESPÓŁ DOSKONAŁY

Od momentu włączenia krok po kroku, spokojnymi i stanowczymi komunikatami Samaritan PAD mówi Ci, co masz robić. Kieruje twoimi działaniami tak, aby elektrody znalazły się w odpowiednim miejscu – a zebrany wykres EKG pozwoli zdecydować co robić dalej. Analiza EKG, zalecenie masażu serca lub defibrylacja – to procesy, które są skomplikowane i opierają się na bieżącej analizie rytmu serca. Jednak nie musisz się tym martwić. Nie ma obaw o to, że sobie nie poradzisz, że nie pamiętasz schematów czy zasad działania. Nie Ty musisz decydować co robić i jak to robić. Wykonujesz tylko kilka prostych czynności. Tylko tyle dla Ciebie – aż tyle dla kogoś.

### BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH

Samaritan PAD to komfort dla osoby, która go używa oraz maksymalne bezpieczeństwo dla osoby, której udzielana jest pierwsza pomoc. AED używane są zwykle przez przypadkowych świadków zdarzenia. Dlatego Samaritan PAD jest intuicyjny i odpowiedni właśnie dla osób, które nie potrafią udzielać pierwszej pomocy. Jest bezpieczny. Nie przechodzi do dalszych kroków, jeśli wcześniejsze nie są poprawnie zakończone. Stwarza maksimum bezpieczeństwa dla poszkodowanego dzięki najbardziej optymalnej fali defibrylacyjnej i elektrodom, które jednocześnie mogą na bieżąco prowadzić zapis EKG.

### WIELKI POMYSŁ W MAŁEJ FORMIE

Każdy centymetr małej przestrzeni Samaritana ma swoje znaczenie. A jedno z największych osiągnięć to objęty patentem system kasety PAD-Pak, a więc połączenia w jeden element baterii i elektrod. To nowatorskie i innowacyjne rozwiązanie, które pozwoliło uzyskać aż 4 letnią gwarancję na cały element, łatwość jego wymiany oraz brak konieczności dbania datę ważności elektrod i baterii oddzielnie. PAD-Pak to mały, pełen energii ideał, który na dodatek niewiele kosztuje.

### Parametry

#### Informacje ogólne

Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca

#### Tryb pracy

Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibrylacyjnego.

---

#### Wygląd

Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

#### Gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

#### Bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

#### Opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu

#### Wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

#### Fala

Żałamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany żałamek dwufazowy dostosowuje energię, zbrocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

#### Czułość / dokładność

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.

#### Temperatura pracy / gotowości

Od 0°C do 50°C.

#### Wilgotność względna

Od 5% do 95%.

#### Wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

#### Energia

Dorośli: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J

Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

#### Czas ładowania

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

#### Pojemność baterii

Powyżej 100 wstrząsów.

#### Długość przewodów

1 metr

#### Wykonanie

Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.

#### Metronom

Graficzny i dźwiękowy.

#### Język

Polski (inne języki jako opcjonalne).